

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhà sản xuất	<b>Welford Manufacturing (M) Sdn.Bhd</b>
Địa chỉ nhà SX	Số 25 Jalan BRP 9/1B, Putra Industrial Park, 4700 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tên sản phẩm	<b>KIM LUÒN TĨNH MẠCH</b>
Nhãn hiệu	<b>WELCARE</b>
Xuất xứ	Malaysia
Tiệt trùng	Tiệt trùng bằng khí EO
Hạn sử dụng	5 năm
Chỉ định	Dùng để tiêm thuốc truyền vào tĩnh mạch cơ thể bệnh nhân
Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chọn đúng kích cỡ kim luồn sao cho phù hợp và luôn sử dụng ống thông có cỡ nhỏ nhất đáp ứng nhu cầu chuyên môn cho việc tiêm truyền dịch.</li><li>2. Sau khi vệ sinh sát trùng vùng tiêm truyền trên da, tháo đầu bảo vệ kim luồn và cắm kim vào ven chỉ định. Nếu cắm kim đúng ven, máu sẽ chảy vào khoang chứa trên kim và có thể quan sát bằng mắt thường.</li><li>3. Đẩy nhẹ kim sâu hơn vào ven và cùng lúc rút kim thép ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Nên cắm kim theo một góc nhỏ trên bề mặt da.</li><li>4. Dùng băng keo cố định ống thông vào da.</li><li>5. Trước khi rút kim hoàn toàn ra, nhấn nhẹ vào tĩnh mạch phía cuối kim nhằm ngăn máu trào ngược.</li><li>6. Không cố gắng cắm lại kim khi đã rút ( một phần hoặc toàn phần)</li><li>7. Vứt đầu kim vào khu vực chứa rác thải y tế cho đồ vật sắc nhọn</li><li>8. Nối dây truyền với khóa nối trên kim luồn và băng lại bằng băng vô trùng.</li><li>9. Kiểm tra vị trí đâm kim thường xuyên và loại bỏ ngay kim luồn ra nếu phát hiện dấu hiệu bị nhiễm trùng.</li></ol>
Chống chỉ định	Không nên sử dụng kim luồn khi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bệnh nhân quá mất cảm với bất kỳ thành phần nào của nguyên vật liệu</li><li>2. Truyền dịch có độ nhớt cao</li><li>3. Truyền máu với khối lượng lớn</li></ol>
Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ sử dụng nếu bao bì còn nguyên vẹn và chưa hết hạn sử dụng</li><li>- Sau khi rút không được cắm lại kim thép vào ống thông, vì kim thép có thể bị đứt gây ra thuyên tắc ống thông</li><li>- Sản phẩm này chỉ nên được sử dụng bởi nhân viên y tế có trình độ và đã được đào tạo</li><li>- Sử dụng sản phẩm ngay lập tức sau khi mở bao bì</li><li>- Sản phẩm này chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng hoặc tái khử trùng</li><li>- Kiểm tra tĩnh mạch lưu thông máu tốt trước khi đâm kim</li><li>- Bảo quản nơi khô, ráo tránh ánh sáng trực tiếp</li></ul>
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Tuỳ thuộc vào thời gian lưu ống thông, vào loại và lượng dịch truyền, và theo khuynh hướng của từng cá nhân, viêm tắc tĩnh mạch có thể xảy ra  Trong chọc dò động mạch, động mạch có thể bị tắc trong một số trường hợp hiếm hoi do biến chứng huyết khối hoặc tắc tĩnh mạch, dẫn đến thiếu máu cục bộ